

OPHTALMIC
SPACIO

VERRE PROGRESSIF D'INTÉRIEUR

LA SOLUTION
SUR MESURE
POUR UNE VISION
PARFAITE
EN INTÉRIEUR



DISPONIBLE EN
FABRICATION
FRANÇAISE

ophtalmic
VISION



Alors que nous passons la majorité de notre temps **en intérieur**, que ce soit au travail, à la maison ou pour nos loisirs, les **besoins visuels** des porteurs s'en trouvent impactés.

Les presbytes sont d'autant plus touchés qu'ils éprouvent des **difficultés à voir en vision intermédiaire et de près**, zones les plus sollicitées en intérieur.

16h10

C'est le nombre d'heures quotidiennes passées au sein du logement*



Plusieurs constats...

Constat n°1

Nous passons la plupart du temps en intérieur (travail-domicile)

- Sollicitation intense en intérieur de la Vi et Vp

Constat n°2

Les visions intermédiaire et de près sont les principales sources d'inconfort

- Les besoins visuels de chaque porteur sont spécifiques selon leurs zones de travail
- Les verres progressifs ou vision de près n'assurent pas une vision optimale

Plusieurs solutions ...

- Le repos
- L'ergonomie du poste de travail
- Une correction parfaite notamment des petits astigmatismes
- Une rééducation oculomotrice
- **Pour les presbytes, des verres correcteurs spécifiques :**

OPHTALMIC
SPACIO
VERRE PROGRESSIF D'INTÉRIEUR

BIENVENUE DANS L'UNIVERS OPHTALMIC SPACIO

1 VERRE • 3 SOLUTIONS

OPHTALMIC
SPACIO

VERRE PROGRESSIF D'INTÉRIEUR

Ophthalmic Spacio, verres progressifs Freeform individualisés, optimisent largeur et profondeur de champs afin d'offrir à chaque presbyte un confort visuel et postural inédit dans un environnement intérieur. Son concept est ultra simple ! Grâce à leur 3 choix de design (Buro, Médio et Intério), les verres Spacio permettent d'assurer des champs de vision optimisés en fonction des activités de chaque porteur.

Le concept


- Verres progressifs spécialisés
- Optimisés pour les activités en intérieur : travail, loisirs
- Performants pour tous les presbytes



Ophthalmic Spacio : le verre idéal pour toutes les activités en intérieur, aussi bien au travail qu'à la maison !

L'UNIVERS OPHTALMIC SPACIO

1 verre, 3 solutions :

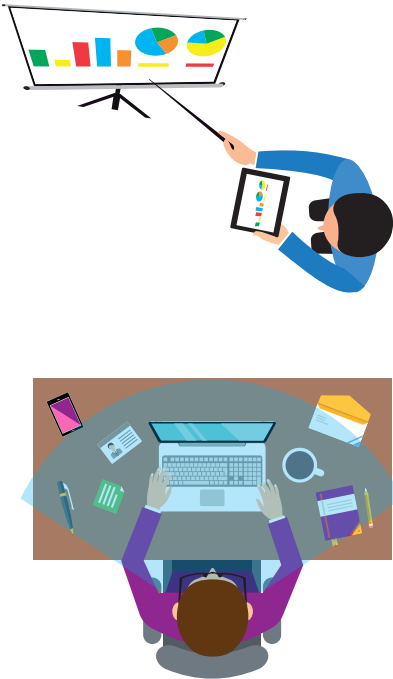

BURO

- Vision extra large **de 40 cm à 80 cm** quelle que soit la presbytie
- Idéal pour le travail de bureau et les **activités de proximité**
- Largeur de champs inégale en intermédiaire



MÉDIO

- Vision extra large **de 40 cm à 130 cm** (voire plus pour les petites additions) quelle que soit la presbytie
- Idéal pour le travail de bureau combiné à un besoin visuel **à l'intérieur sans déplacement**



INTÉRIO

- Vision extra large **de 40 cm jusqu'à 4 m** quelle que soit la presbytie
- Solution idéale pour des porteurs mobiles dans un **environnement intérieur**


1 VERRE, 3 SOLUTIONS

↳ Pour l'opticien


- **Large gamme** pour une offre plus systématique
- Vente d'équipement spécifique supplémentaire
- Vente à **valeur ajoutée**
- Produit de conseil et d'image
- **Satisfaction et fidélisation** client
- **Simple** à commander (calcul automatique de la variation)
- **Individualisation** des données monture possible sans supplément

↳ Pour le porteur

- Champs de vision **nets et larges** de près comme à une distance intermédiaire
- Profondeur de champ **adaptée** aux besoins de chacun
- **Vision plus naturelle** au bureau
- Posture **confortable** de la tête et du corps
- Idéal pour toutes les activités en intérieur : loisir ou travail

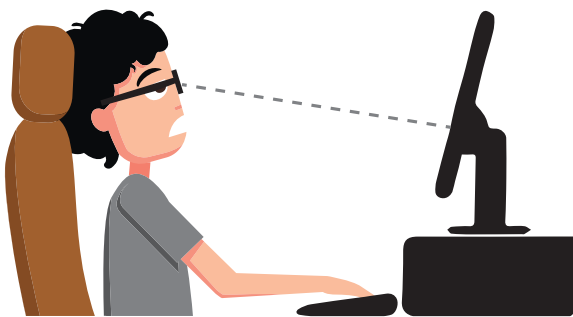

Port de tête avec des verres progressifs

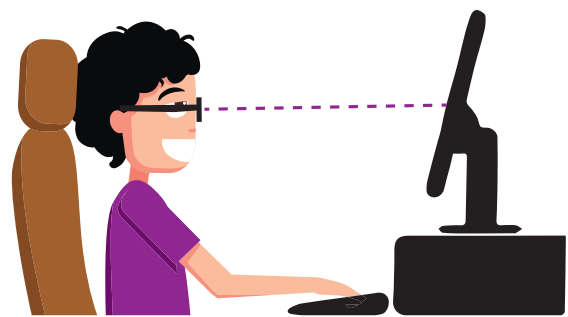

Port de tête avec des verres OPHTALMIC SPACIO

INFOS TECHNIQUES

Gamme de matériaux et puissances

10 matériaux

Indice \ Type	Blanc	Sunlite
1,50	●	●
1,50 Cozylens	●	
Poly	●	
1,60	●	●
1,60 Cozylens	●	
1,67	●	●
1,67 Cozylens	●	

Large gamme de puissances

Puissances	De -7,00 D à 8,00 D Cyl de 4,00 Cyl HG 4 à 6,00 D Add 0,75 à 3,50 D
Diamètres décentrés ovalisés option diamètre rond gratuite	60/65 à 75/80

A Noter

Toutes les grilles de fabrication sont disponibles en ligne sur notre catalogue électronique accessible sur www.ophtalmic-espace.fr



Gravures et marquages


Gravures

Nom de produit	Repérage axial	Signe nasal / Référence profil	Signe temporal Addition / Indice	Matière	Indice
Ophthalmic Spacio 150	0 0	SP ou SP-S** B ou M ou I*	250 n50	Organique	1,50
Ophthalmic Spacio 150 Cozylens	0 0	SP ou SP-S** B ou M ou I*	250 n50	Organique	1,50
Ophthalmic Spacio 150 Sunlite	0 0	SP ou SP-S** B ou M ou I*	250 n50	Organique	1,50
Ophthalmic Spacio Poly	0 0	SP ou SP-S** B ou M ou I*	250 n59	Polycarbonate	1,59
Ophthalmic Spacio 160	0 0	SP ou SP-S** B ou M ou I*	250 n60	Organique	1,60
Ophthalmic Spacio 160 Cozylens	0 0	SP ou SP-S** B ou M ou I*	250 n60	Organique	1,60
Ophthalmic Spacio 160 Sunlite	0 0	SP ou SP-S** B ou M ou I*	250 n60	Organique	1,60
Ophthalmic Spacio 167	0 0	SP ou SP-S** B ou M ou I*	250 n67	Organique	1,67
Ophthalmic Spacio 167 Cozylens	0 0	SP ou SP-S** B ou M ou I*	250 n67	Organique	1,67
Ophthalmic Spacio 167 Sunlite	0 0	SP ou SP-S** B ou M ou I*	250 n67	Organique	1,67

* Gravure d'identification des 3 profils Buro (B), Médio (M) et Interio (I)

**Gravure pour la version Spacio couloir court

Marquages

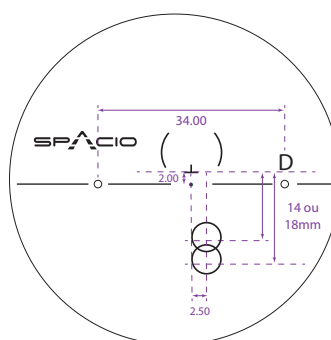


COMMANDE ET MONTAGE

Saisie de commande


- A commander en prescription VL + addition
- Choix de l'environnement porteur : Buro, Médio ou Intério
- Choix du couloir : **classic (18 mm)** ou **court (14 mm)**
- Puissances compensées selon les valeurs montures standards ($8^\circ/12\text{mm}/6^\circ$)
- Individualisation possible en modifiant les données monture
- Préalibrage en option



Angle Pantoscopique*

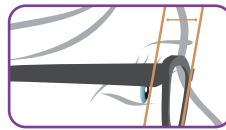

Distance verre-oeil*

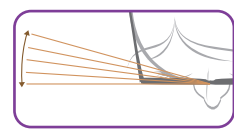


Angle dièdre*


*Données facultatives : valeur standard par défaut ($8^\circ/12\text{mm}/6^\circ$)
Individualisation possible en changeant les données montures sans supplément

Conseil de montage

Conseils de montage pour adapter les verres Ophthalmic Spacio (**buro, médio et intério**)

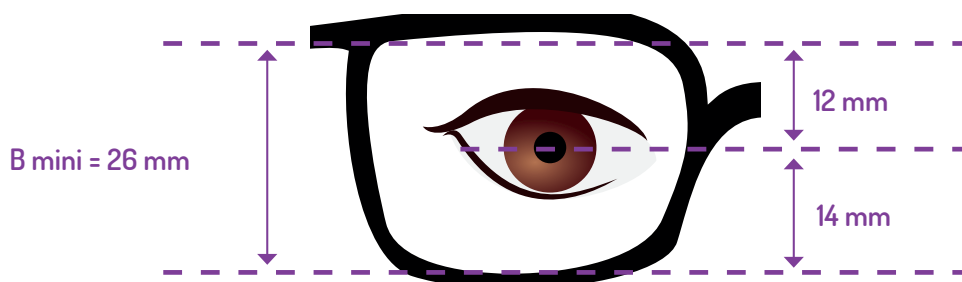

- Centrage croix de montage en pleine pupille selon les écarts VL
- 2 couloirs au choix : **classic (18 mm)** ou **court (14 mm)**

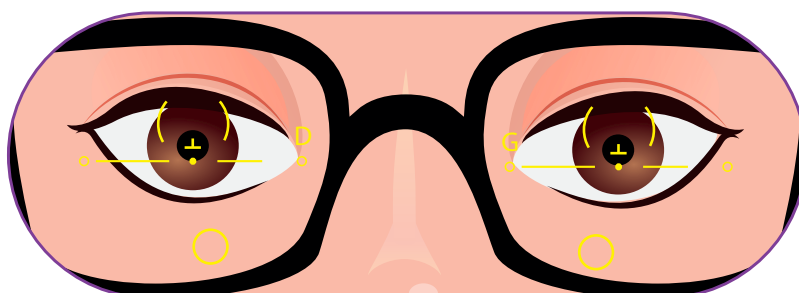

INFOS ET COMMANDES

Infos pratiques

- Disponibles en Pack 60
- Livrés avec une Carte porteur
- Garantis pour l'adaptation 3 mois
- Disponibles avec tous les traitements
- Verres premium intégrés au calcul du remboursement de l'application Vision Fit



Comment commander les verres Spacio

La commande de verres Ophthalmic Spacio se fait à partir du site de commandes en ligne :



Informations et commandes

Par téléphone : **0 820 040 142** Service 0,12 € / min + prix appel

Par email : commandes.verres@ophtalmic.fr

Par internet :  **Webstore Vision**
via www.ophtalmic-espace.fr

Conseils et informations techniques par téléphone au :

0 800 800 442 Service & appel gratuits



Les verres Ophthalmic Spacio sont des dispositifs médicaux de classe I qui portent le marquage CE et qui sont destinés à corriger certaines amétropies et presbyties. Dispositifs remboursables partiellement par les organismes d'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés suite à une prescription médicale valide. Consultez les instructions disponibles dans notre catalogue électronique. Fabricant Ophthalmic Compagnie.
Bro-Spacio-2020-09.2020.v2